




PLÁN ÚDRŽBY A DESINFEKCE
souprav A-DEC
a koncovek W&H



PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA SOUPRAVY

1. DENNÍ ÚDRŽBA

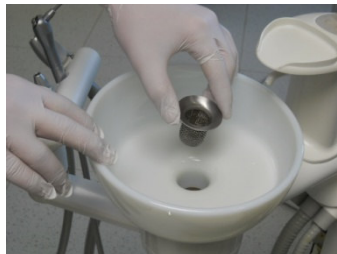

Vyčistěte sítko plivátka.



Vyčistěte sítko terminálu savenk.

Dávkování
Orotol Plus
2 litry vody a 2 odměrky

Savky se proplachují
1 až 2x denně.



Namíchejte si desinfekční a čistící roztok Orotol Plus, Durr.



Míchací nádobu protřepejte.

1. propláchnutí



Postavte nádobu na zem dle obrázku a připojte savky.



Nechte odsát cca polovinu roztoku z nádoby, odpojte savky a nádobu uschovejte.


2. propláchnutí




Položte nádobu na zem dle obrázku a připojte savky.



Nechte odsát většinu roztoku v nádobě, odpojte savky.

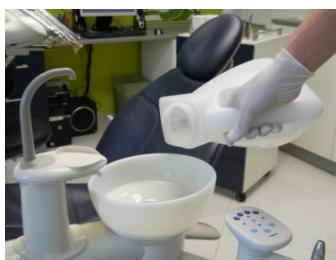

Zbylé množství roztoku vylijte do plivátka.

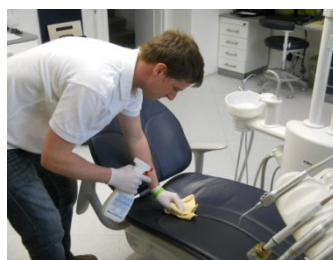

Očistěte polstrovaní „čistíkem“ Upholstery Cleaner

2. TÝDENNÍ ÚDRŽBA

(provádějte vždy **1x týdně** ve stejném čase minimálně **2 hodiny před** použitím desinfekce - **OrotolPlus**)

RÁNO PŘED PRACÍ



Nalejte do plivátka MD550
a nastavte si minutku na 15 minut.

Dávkování
Orotol MD555
1 litr vody a 2,5 odměrky

Savky se proplachují
min. 1x týdně.



Namíchejte si čistící roztok
Orotol MD 555, Durr.



Míchací nádobu protřepejte.



Položte nádobu na zem dle
obrázku a připojte savky.




Zbylé množství roztoku vylijte do
plivátka.




Po zaznění minutky nebo po 15 minutách propláchněte
plivátko velkým množstvím vody, minimálně 1 litr.

ODPOLEDNE PO PRÁCI

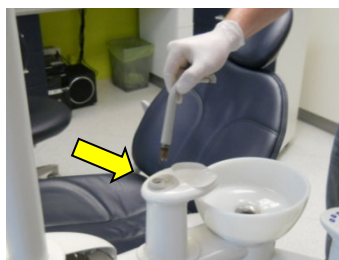

Zkontrolujte zanesení fontánky plivátka vodním kamenem. Případně vyčistěte.

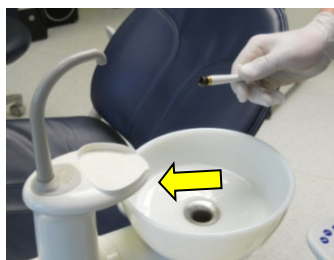

Zkontrolujte zanesení trysky oplachu plivátka vodním kamenem. Případně vyčistěte.

Při použití odstraňovače vodního kamene na trysku a fontánku suňte předem o_kroužek.

Při opětovném složení namažte.



Demontujte hadici velké savky.



Propláchněte hadici střídavým pohybem proudem vody.



Rozeberte hlavici velké savky a vyčistěte.



Demontujte hadici malé savky.



Propláchněte hadici střídavým pohybem proudem vody.



Rozeberte hlavici malé savky a vyčistěte.

Namažte všechny černé o_kroužky vazelínou ALSITB.



Složte savky do původního stavu.



Zkontrolujte sítko savek separátoru amalgámu, případně vyčistěte proudem vody.



Zkontrolujte sítko plivátka separátoru amalgámu, případně vyčistěte proudem vody.



Vyčistěte ochranný kryt světla od prachu.



Otřete plastové kryty soupravy od prachu.

Dále proveďte denní údržbu.

3. DOPLŇOVÁNÍ LÁHVE S DESTILOVANOU VODOU



Vypněte soupravu a sundejte láhev na destilovanou vodu.





Dolijte destilovanou vodu téměř do plna a přidejte ICX tabletu.



Láhev nasadte zpět na soupravu a soupravu zapněte.

4. NEPRAVIDELNÁ ÚDRŽBA – údržba násadců a turbínek

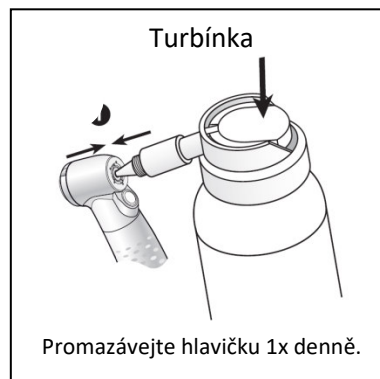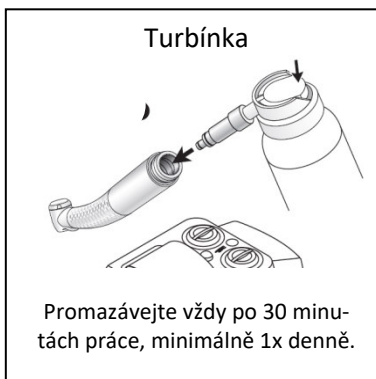

Po namazání nechte koncovku hlavičkou dolů cca 30 sekund chodu.

V případě používání mazacího automatu Assistina 301 proveďte na konci pracovní doby promazání hlavičky násadce nebo turbínky.

